

ШИНИ ЗА ИЗБЕЛВАНЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА



1. Преди да започнете процедурата, измийте добре зъбите си.
2. Отстранете капачката на накрайника.
3. Поставете малка капка гел във всяко отделение на шините.
4. Поставете шината върху съответната челюст, като гелът трябва да се разнесе добре върху предната повърхност на всички зъби, които желаете да избелите и по възможност да не излиза извън шините.
5. Премахнете излишъка от гел с плат или суха мека четка.
6. Дръжте шините в устата си между 45 и 90 минути.
7. Отстранете шините, като ги изплакнете с хладка вода.
8. Изплакнете устата си и измийте зъбите си отново.

Забележка:

Не консумирайте храни и напитки и се въздържайте от тютюнопушене по време на третирането и 2 часа след това. Съхранявайте гела в хладилник. Избягвайте контакт с кожата и очите. При случаен контакт, измийте обилно с вода и при необходимост, потърсете лекарска помощ. Не е препоръчително да се прилага по време на бременност и кърмене, при страдащи от диабет и сърдечно-съдови заболявания, както и при деца под 18 години. При поява на чувствителност, носете шините за по-кратко време на ден. Имайте предвид, че коронки, мостове, пломби и други реставрации няма да се повлияят от избелването и вероятно ще трябва да бъдат подменени. Препоръчително е професионално почистване на зъбен камък преди избелването. В зависимост от Вашето предпочитание, избелването може да се провежда през деня или през нощта. За максимална ефективност, използвайте шините ежедневно в продължение на 8 дни.